


器 80 はり又はきゅう用器具  
 一般医療機器 家庭用貼付型接触粒（71026000）  
 販売名 トリリオン・ヘックス

**【警告】**  
 ・磁気共鳴画像診断装置(MRI)の検査を受ける人は、検査の前に使用を中止すること。  
 ・装着部に発疹、発赤、かゆみなどの症状が現れた場合は、直ちに使用を中止すること。

**【禁忌・禁止】**  
 ・次の人は、使用前に医師に相談下さい。  
 悪性腫瘍のある人。  
 糖尿病などによる高度な抹消循環障害による知覚障害のある人。  
 皮膚に感染症及び創傷のある人。  
 安静を必要とする人。

**【形状・構造及び原理等】**

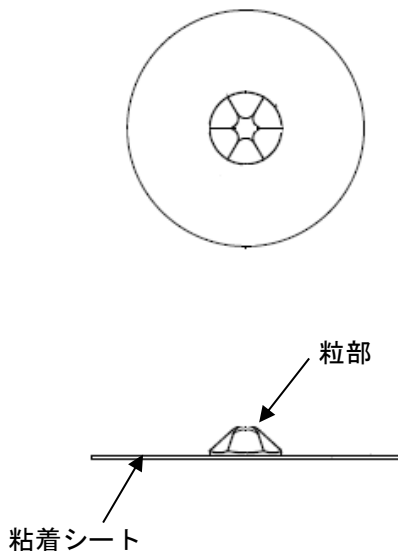

- 構成  
 粒部：テラヘルツ人工鉱石 10個  
 粘着シート：基材レーヨン不織布 11シート（110枚）
- 寸法  
 粒部：直径 7mm、高さ 3mm  
 粘着シート：直径 23mm
- 動作原理  
 粘着テープの中央に粒状の硬質物を付し、身体のコリの部分に貼付することにより、圧迫し治療する。

\* **【使用目的又は効果】**  
 家庭において、粘着テープの中央に粒状の硬質物を付し、身体のコリの部分に添付することにより、圧迫し、「コリの緩解」を目的とする器具である。本品は家庭において使用する。

\* **【使用方法等】**

- ・コリのある部分に、必要に応じた数の粒を張って使用する。
- ・貼付部位の汚れ、湿気を事前にとり清潔にする。
- ・粘着シートをランナーから剥がして使用する。
- ・本品の粒は再使用可能です。

**【使用上の注意】**  
 ・使用しても効果が現れない場合は医師又は専門家に相談してください。  
 ・皮膚に傷、炎症がある部位、目の周囲及び粘膜には貼らないでください。  
 ・貼付した部位に異常を感じる場合には、本品の使用を直ちに中止してください。  
 ・本品に異常が生じ、粘着シートの粘着性が悪くなった場合は新しいものと交換してください。  
 ・児童及び監督を必要とする方は、保護者の指導のもとで使用してください。  
 ・本品の改造おこなわないでください。

\* **【保管方法および有効期間等】**  
 ・高温・多湿の場所を避けて保管ください。  
 ・子供及び監督を必要とする方の手の届かない場所に保管ください。  
 ・耐用期間：購入後3年

**【保守・点検に係る事項】**  
 本品に異常が生じ、粘着シートの粘着性が弱くなったなら、新しいものと交換してください。

\* **【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：株式会社アコース  
 〒395-0807 長野県飯田市鼎切石 4376-4  
 TEL：0265-53-6571

製造業者：株式会社アコース  
 〒395-0807 長野県飯田市鼎切石 4376-4  
 TEL：0265-53-6571

販売業者：